

## **УПУТСТВО за прикупљање материјала за вирусолошко испитивање COVID-19**

За потврду инфекције вирусом COVID-19, потребно је то што пре од почетка болести од особе са суспектном инфекцијом, узети комбиновани брис ждрела и носа.

### **Узимање бриса из ждрела и носа**

*- Начин узимања је исти као код сумње на грип!*

*- Користи се исти транспортни медијум који се користи за грип*

- Транспортни медијум (обезбеђује Институт Торлак); до употребе чувати на –20 оС и непосредно пре узорковања комплетно отопити.
- Стерилни штапићи са ватом
- Стерилан брис енергично превући преко слузокоже задњег зида ждрела.
- Други брис увући што дубље у носну шупљину и ротирати га неколико пута.
- Оба бриса ставити у исту бочицу са транспортним медијумом, уз благо мешање бриса у медијуму (транспортни медијум постаје благо облачаст).
- Преломити крајеве брисева који су ван бочице тако да бочица може да се затвори. Не додиривати отвор бочице са медијумом!
- Чврсто затворити бочицу да не би дошло до изливања заразног материјала у току транспорта.
- Правилно обележити бочицу ( име и презиме ) и попунити Упутну листу и Образац за испитивање случаја сумње на COVID-19
- Материјал транспортовати до Националне референтне лабораторије најкасније за 48 сати од момента узимања.

**Приликом узорковања материјала користити личну заштитну опрему!**

#### **Напомена :**

Најавити лабораторији доношење материјала. Транспорт се врши на +2 до + 8оС. До транспорта узорке чувати на + 4оС (у фрижидеру). Не замрзавати узорке на – 20оС јер се губи инфективност вируса.